

HeartStart MRx Akku-Kontaktstifte Nachtrag zur Gebrauchsanweisung

Legen Sie diesen Nachtrag zusammen mit der *HeartStart MRx Gebrauchsanweisung* ab.


Hintergrund

Die Kommunikation zwischen dem HeartStart MRx und dem Akku erfolgt über acht Akku-Kontaktstifte in jedem Akkufach. Für eine zuverlässige Verbindung des Akkus müssen die Akku-Kontaktstifte sauber und unbeschädigt sein.

Besondere Vorsicht ist geboten, wenn der HeartStart MRx bei einem externen Transport oder im Rettungsdienst eingesetzt wird, weil die Akku-Kontaktstifte in diesen Umgebungen zusätzlichen Belastungen ausgesetzt sein können und sich die Wahrscheinlichkeit für Verschleiß erhöht, was sich auf die Lebensdauer der Teile auswirken kann.

Achten Sie beim Wechsel der Akkus und beim Entfernen oder Austausch des Wechselstrom-Netzmoduls insbesondere darauf, dass die Akku-Kontaktstifte nicht verbogen werden. Häufige Akkuwechsel und der Einsatz in einer Rettungsdienst-Umgebung können für die Akku-Kontaktstifte eine zusätzliche Belastung darstellen und die Wahrscheinlichkeit für Verschleiß erhöhen, was sich negativ auf die Lebensdauer auswirkt.

Abbildung **Akku-Kontaktstifte**

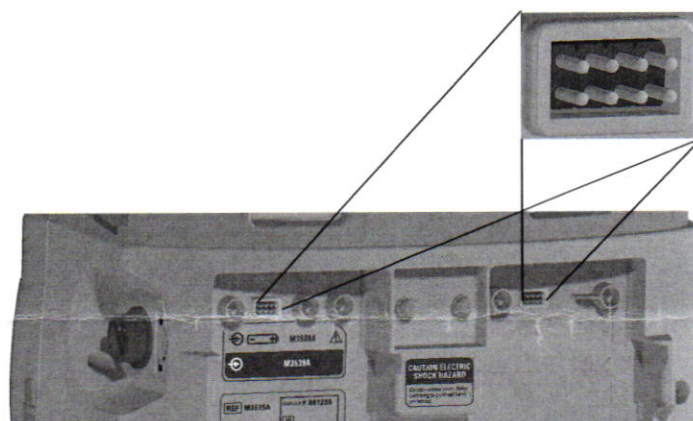

Akku-Kontaktstifte,
acht in jedem Fach

Daher empfiehlt Philips Healthcare, bei den Verfahren zur Geräteprüfung und Problembehebung folgende Änderungen vorzunehmen:

Sichtprüfung - Gerät OK?

Im Kapitel **Wartung**, Abschnitt **Funktionsprüfungs-Bericht**, Unterabschnitt **Benutzerprüfungen**, wurde im Absatz **Sichtprüfung - Gerät OK?** eine Änderung vorgenommen:

Sichtprüfung - Gerät OK?: Darauf achten, dass der HeartStart MRx sauber (einschließlich der Oberflächen der Paddles und des Paddle-Halters) ist, frei zugänglich ist und keine sichtbaren Beschädigungen aufweist. Außerdem darauf achten, dass beide Akkufächer des HeartStart MRx geprüft werden, um sich zu vergewissern, dass die Kontaktstifte sauber, nicht verbogen und vollständig zugänglich sind und keine Rückstände oder Ablagerungen vorliegen.

Akkufach-Wartung

Im Kapitel **Wartung** wurde nach dem Abschnitt **Akku-Wartung** der Abschnitt **Akkufach-Wartung** eingefügt:

Sichtprüfungen: Darauf achten, beim Akkuwechsel und bei der Wartung des Geräts die Akkufächer des HeartStart MRx zu prüfen. Vergewissern, dass die Kontaktstifte sauber, nicht verbogen und vollständig zugänglich sind und keine Rückstände oder Ablagerungen vorliegen.

Fehlerbehebung

Im Kapitel **Fehlerbehebung** wurde in der Tabelle **Allgemeine Fehler** ein neuer Eintrag hinzugefügt:

Tabelle **Allgemeine Fehler (Zusatz)**

Fehler	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
System neu gestartet Störungsmeldung	Beschädigter Akku-Anschluss	Beide Akkufächer des HeartStart MRx auf sichtbare Anzeichen von Schäden an Kontaktstiften prüfen.

Abhilfe

Wenn bei der Überprüfung der Akkufächer eine Beschädigung der Kontaktstifte festgestellt wird, richten Sie eine Anfrage an Ihren Ansprechpartner beim Philips Kundendienst, um die Akku-Anschlussplatte austauschen zu lassen.



Philips Healthcare ist ein
Unternehmen der Royal Philips

Internet
www.philips.com/heartstart

E-Mail
healthcare@philips.com

Fax
+31 40 27 64 887

Europa, Asien und Afrika
Tel.: +49 7031 463 2254

Lateinamerika
Tel.: +55 11 2125 0764

Nordamerika
Tel.: +425 487 7000
+1 800 285 5585 (nur USA)

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.
Jede Verwertung außerhalb der engen
Grenzen des Urheberrechtsgesetzes
bedarf der vorherigen schriftlichen
Zustimmung.

Philips Healthcare behält sich das Recht
vor, ein Produkt zu verändern oder die
Herstellung zu jedem Zeitpunkt und
ohne Ankündigung oder Verpflichtung
einzustellen.

Veröffentlicht Feb. 2017, 2. Auflage
Gedruckt in den USA
453564693011



FCO86100179